

► Voordelen van Burnshield Hydrogel

- Burnshield is voor alle brandwonden geschikt;
- patiënten kunnen direct vervoerd worden;
- de behandeling hoeft niet gestaakt te worden;
- Burnshield koelt, verlicht de pijn, minimaliseert de ontwikkeling van de brandwond;
- er ontstaat geen onderkoelingsgevaar;
- Burnshield is steriel en antibacterieel en wordt in gel-, kompres- en dekenvorm geleverd;
- Burnshield is Ph-neutraal en hypoallergeen (niet irriterend en niet toxisch);
- Burnshield hecht niet aan de wond;
- de wond blijft diagnoseerbaar;
- een positieve invloed op de latere wondgenezing;
- kan 12 tot 24 uur werkzaam blijven (mits juist gefixeerd).

► Solace Zonnebrand & Aftersun

Solace is een zonnebrand gel met Tea Tree Olie in sprayvorm, die de huid beschermt tegen de schadelijke UVA & UVB straling van de zon en is ook geschikt voor de gevoelige huid. De gel laat een wit laagje achter, dat nodig is om een goede bescherming te bieden. Solace Aftersun heeft een kalmerende en verkoelende


uitwerking op de zonverbrande huid. De gel bestaat uit 96% water en Tea Tree olie.

De zonnebrandspray is aanbevolen en erkend door de Afrikaanse kankerbestrijding (Canca) tegen de schadelijke gevolgen van de zon.


► Applicatie aanwijzingen




openen

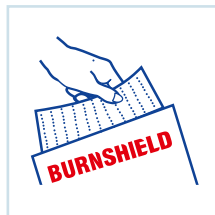

uittomen

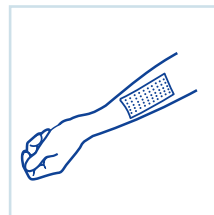

aanbrengen

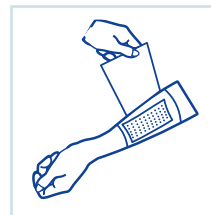

fixeren

BURNSHIELD®

EMERGENCY BURNCARE



Hét product bij brandwonden

► Brandwondenbehandeling

Een brandwond is een van de meest ernstige letsels en dient adequaat behandeld te worden, waardoor de langere termijn gevolgen verminderd kunnen worden. Een goede wondverzorging is daarom van groot belang.

Koeling, Infectie-preventie en Pijnbestrijding.

Hinderende kleding en voorwerpen dienen zoveel mogelijk te worden verwijderd. Aan de wond vastzittende kleding niet verwijderen om extra weefsel-schade te voorkomen.

Begin zo snel mogelijk met:

KOELEN

Snelle aanhoudende koeling van het verbrande oppervlak vermindert niet alleen de diepte van de verbranding, maar ook de oppervlakte ervan.

INFECTIEPREVENTIE

Bacteriën kunnen door het wegvallen van de huidbarrière via de brandwonden gemakkelijk het lichaam binnendringen. De wonden dienen steriel te worden afgedekt. Vooral geen zalven en/of crèmes op de brandwonden aanbrengen.

PIJNBESTRIJDING

Een snelle effectieve koeling, in samenhang met een vochtig milieu, zal de pijnsensatie sterk verminderen. Voorkom dat de brandwond dieper wordt.

Burnshield kan direct op de brandwond worden gebracht, zodat hydrogel in contact kan worden gebracht met de verbranding.

Do's

Spoelen met lauw stromend water.

Breng het juiste formaat kompres aan, bedek het wondgebied zo volledig mogelijk.

Verwijder alle voorwerpen zoals sieraden die voor bekneling kunnen zorgen.

Verwijder alle kleding of andere voorwerpen die niet aan de wond vast zitten.

Gebruik fixatieverband, plastic of (huishoud) folie.

Dont's

Verwijder niets dat aan de wond vast zit, tenzij het nog steeds heet is of smelt.

Open geen brandblaren.

Raak de wond niet met blote handen aan.

Breng geen vette of op olie gebaseerde crèmes en lotions aan op de wond.

Kompres niet fixeren met hydrofiële windels en gazen of ander absorberend materiaal.

► Eerst water, de rest komt later

Water is hét ideale medium bij verbrandingen. Vandaar dat de Nederlandse brandwondenzorg dat ook over de afgelopen jaren sterk heeft gepropageerd: EERST WATER, DE REST KOMT LATER!

Het gebruik van water kent echter ook nadelen, bijvoorbeeld de praktische problemen tijdens het transport van een patiënt. Burnshield Hydrogel is in dit soort gevallen een uitstekend alternatief.

Koelen van het wondgebied heeft altijd zin, tot zeker één uur na het ongeval. Voor een goede koeling werd tot dusver in Nederland het gebruik van stromend water op een aangename temperatuur, of met een temperatuur die door de patiënt als aangenaam ervaren wordt, geadviseerd. Vol-

wassen moeten minimaal 10 minuten koelen en kinderen minimaal 5 minuten. Dit is essentieel voor een goede doorstroming van het wondgebied, waardoor warmteafgifte kan plaatsvinden. Lauw stromend water is door de patiënt langer vol te houden en geeft minder risico op onderkoeling.

Koeling zorgt voor een geleidelijke hitte afvoer vanuit de wond, waardoor uitbreiding van de brandwond wordt tegengegaan. Tevens zijn vermindering van oedeemvorming (tot ongeveer 50%), bescherming van het microvasculaire systeem en een onmiddellijke pijnstilling effecten van koeling.

► Effecten van Hydrogel bij brandwonden

Het gebruik van Burnshield Hydrogel kompressen en dekens is een veilige, efficiënte en volwaardige koelmethode. Het heeft als basis een waterachtige, melkwitte tot heldere hydrogel, bestaande uit 96% water, waaraan conserveringsmiddelen zijn toegevoegd. De belangrijkste werkzame stof in de hydrogel is Melaleuca Alternifolia, beter bekend als Tea Tree Olie. Deze etherische olie uit Australië werkt ontsmettend, stimulerend, bacteriedodend en voorkomt littekenweefselvorming. Ook heeft deze olie een enigszins pijnstillende werking.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat Hydrogel exact hetzelfde effect heeft als lauw water. Ook wanneer de gel pas na 30 minuten wordt aange-

bracht, is er een aantoonbaar positief effect op de diepte en omvang van de wond en derhalve ook op de genezing.

Burnshield is verkrijgbaar als kompres, deken en een gel. De kompressen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor verschillende lichaamsdelen en zijn gemaakt van een synthetisch foam. Dit kan een maximum aan gel fixeren en sluit naadloos op alle contouren van het lichaam aan. De dekens zijn gemaakt van een 100% wollen basisstof, zodat deze zelfs bij extreme temperaturen niet kan ontbranden en kan worden gebruikt om lichaamsdelen of de patiënt in z'n geheel in te wikkelen.



Set in etui

Burnshield set I Art nr. 23729

1 kompres 10 x 10 cm
1 kompres 20 x 20 cm
1 kompres 60 x 40 cm

Burnshield set II Art nr. 23728

1 kompres 10 x 10 cm
2 kompressen 20 x 20 cm
2 kompressen 60 x 40 cm



Rescuetas werkplaats

Art nr. B237602

1 kompres 10 x 10 cm
1 kompres 20 x 20 cm
1 kompres 60 x 40 cm
1 fles Burnshieldgel 125 ml
1 paar handschoenen Large
1 rol Rudaplasto 2,5 cm
1 verbandschaar
2 rol Nobafix
1 reddingsdeken goud/zilver



Kompressen

Art nr. 901111 10 x 10 cm
Art nr. 900906 20 x 20 cm
Art nr. 901001 20 x 45 cm
Art nr. 901007 60 x 40 cm
Art nr. 901000 Facemask
Art nr. 901131 Armstrip
Art nr. 901130 Vingerstrip



Brandwondengel

Art nr. 550009 50 ml hydrogel
Art nr. B550008 125 ml hydrogel
Art nr. 550004 3,5 ml blots



Mini Burnkit

Art nr. 550013 NL

kompres 10 x 10 cm
2 x 3,5 ml blots
1 micropore kleefpleister

Art nr. 550014 NL

6 Mini Burnkit in dispenser

Art nr. 550015 NL

10 Mini Burnkit in wanddispenser



Easy Burnkit

Art nr. 550012

2 kompressen 10 x 10 cm
1 kompres 20 x 20 cm
3 x 3,5 ml blots
3 plastic hechtpleisters
1 paar handschoenen
2 rollen elastisch verband 5cm
1 rol kleefpleister
1 schaar



Contourkompressen

Art nr. 881006 100 x 100 cm
Art nr. 881007 100 x 200 cm



Brandwondendekens

Art nr. 881001 245 x 160 cm
Art nr. 881003 120 x 160 cm